


МАССАЖНЫЕ КРЕСЛА

Инструкция по применению

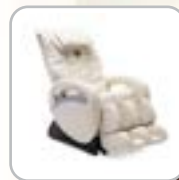

< relax in style

КАЧЕСТВЕННОЕ НЕМЕЦКОЕ МАССАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАССАЖНЫЕ КРЕСЛА

Инструкция по применению

Купив массажное кресло, Вы подтвердили, что заботитесь о своем здоровье. Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Следуя данным рекомендациям, Вы сможете наслаждаться массажем в течение длительного времени.

Желаем Вам провести много приятных минут с Вашим личным массажистом.

С момента основания компании в 2000 году название CASADA ассоциируется с высококачественными продуктами в области здоровья и фитнеса.

Сегодня приборы CASADA можно приобрести более чем в 40 странах мира. Продукты CASADA постоянно совершенствуются, отличаются неповторимым дизайном и неизменной нацеленностью на улучшение качества жизни, они надежны и их качество безупречно.

СОДЕРЖАНИЕ

Противопоказания	4
Массаж	4
Виды массажа	5
Правила безопасности и рекомендации	7

Массажное кресло Kennedy IV (Кеннеди 4)

Комплектация	8
Сборка и установка	8
Управление	10
Технические характеристики	14

Массажное кресло Bismarck 2 (Бисмарк 2)

Комплектация	15
Сборка и установка	15
Управление	16
Технические характеристики	18

Массажное кресло Smart 3 S + массажёр для ног Ottoman (Смарт 3С + Оттоман)

Комплектация	19
Сборка и установка	20
Управление	20
Технические характеристики	22

Массажное кресло Senso II (Сенсо 2)

Комплектация	23
Сборка и установка	23
Управление	24
Технические характеристики	25

Массажное кресло Senator II (Сенатор 2)

Комплектация	26
Сборка и установка	26
Управление	27
Технические характеристики	28

Поиск неисправностей	29
Уход и хранение	29
Гарантийные условия	29
Для заметок	31

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

⚠ Внимание!

Противопоказания к использованию массажного кресла:

- Хронические заболевания в стадии обострения;
- Воспалительные процессы;
- Онкологические заболевания;
- Заболевания сердечно-сосудистой системы;
- Недавно перенесенное хирургическое вмешательство;
- Повышенное/пониженное давление;
- Живленные стимуляторы и имплантаты;
- Нарушения восприятия;
- Беременность;
- Гипертония;
- Инвалидность.

Вне зависимости от имеющихся заболеваний, перед началом использования массажного кресла,

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

МАССАЖ

Каждому знакомо благотворное воздействие массажа на напряженные мышцы. Процессы, происходящие при этом в мышцах, кровеносных сосудах и нервных окончаниях, можно очень наглядно представить.

В организме человека есть кровеносная и лимфатическая система. Кровеносная система снабжает кислородом мозг, внутренние органы и мускулатуру. Лимфатическая же система обеспечивает вывод из организма продуктов обмена веществ, шлаков и токсинов. Во время массажа эти системы стимулируются, ускоряя вывод из организма вредных веществ, улучшая снабжение тканей кислородом и питательными веществами и способствует укреплению иммунной системы, которая защищает наш организм от инфекций и вирусов.



ВИДЫ МАССАЖА

Современные массажные кресла поражают своими возможностями и характеристиками. Для того чтобы вы могли разобраться в видах массажа, мы расскажем про каждый из них отдельно.



Компрессионный массаж (воздушный массаж).

Аналога этому виду массажа в ручном массаже нет.

Надувание и сдувание воздушных подушек, стимулирует естественные рефлексы мышц. Такое воздействие особенно приятно в области икр и ступней.

- нормализует кровообращение и артериальное давление
- убирает отечность, помогает в лечении артритов
- укрепляюще воздействует на сердце и сосуды, избавляет от бессонницы и слабости
- избавляет от целлюлита и лишнего веса, восстанавливает упругость кожи и ее эластичность



Прогрев

Тепловое воздействие, которое дает хороший расслабляющий эффект.

- улучшается кровоснабжение
- нормализуется подача кислорода во все клетки
- улучшает выведение вредных токсинов
- смягчает болевой синдром.



Вибрационный массаж

Производится при помощи вибромоторов, которые встроены в корпус кресла.

- способствует восстановлению нервных волокон
- вызывает сужение и расширение сосудов в зависимости от режима
- улучшает функцию желез внутренней секреции



Поколачивающий массаж

Массажные ролики производят короткие поочередные удары, подражая подушечкам большого пальца, так, если бы массаж делал специалист. Действие поколачивания на организм в основном рефлекторное.

- стимулирует кровообращение в каждом покрове
- снимает мышечное напряжение
- усиливает питание глуболежащих мышц
- улучшает деятельность внутренних органов



Разминающий массаж

Подобно опытным рукам профессионального массажиста, массажные ролики разминают кожу и мышцы, повторяя движение указательного и большого пальца рук. Воздействие происходит на активные точки в области спины, используемые при иглокалывании.

- снимает мышечное напряжение
- повышает сократимость мышц, их эластичность



Роликовый массаж

Роликовый массаж (в ручном массаже перекаत्याвающий) представляет собой приятную смену напряжения и расслабления мышц и, таким образом, способствует успокоению и релаксации. Роликовый массаж оказывает на организм лимфодренажное воздействие: застоявшаяся лимфа оказывается в движении, обмен веществ улучшается, в результате лишняя жидкость выводится из организма.



Шведский массаж

Сочетание поколачивающего и похлопывающего массажа. Этот вид массажа специально предназначен для отдыха мышц. Применяя давление, ролики более сильно воздействуют на мышцы и ткани. Задача шведского массажа состоит в растирании уплотнений, растягивании сосудисто-нервных пучков и мышц.

- способствует полному расслаблению пациента
- снятие психического напряжения, мышечных спазмов и мышечной усталости
- улучшает подвижность суставов



Шицу — точечный массаж

Шицу (надавливание пальцев) представляет собой вид терапии, изобретенный в Японии. Техника массажа состоит из легких надавливаний на строго определенные активные точки. Система шицу оказывает не только лечебное действие, но и предусматривает психическое сосредоточение человека, подвергаемого массажу, что стимулирует защитные силы организма,

- нормализует работу внутренних органов



Dual-Action – Поколачивающий + Разминающий массаж

Самая интенсивная функция массажа, сочетающая в себе комплексное воздействие 2-х различных техник. Для любителей сильного массажа. Совершенно новый вид массажа, совмещающий в себе поколачивающий и разминающий виды массажа.

- расслабление и растяжение всех мышц спины
- снимает мышечное напряжение
- усиливает кровоток и лимфоток



Похлопывающий массаж

Рельефные массажные ролики производят легкие удары, имитируя удары ладони. Этот вид массажа стимулирует естественные защитные силы организма. После похлопываний остается чувство расслабленности и наполненности энергией.

- укрепляет кости и сухожилия
- развивает мускулатуру, повышает подвижность суставов



Музыка

Два динамика, позволяя окружить себя музыкой во время массажа, для создания максимально расслабляющей и уютной атмосферы. Можно подключить любое устройство воспроизводящее музыку, со входом под jack 3,5.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед началом эксплуатации массажного кресла внимательно прочтите следующие правила, чтобы наслаждаться безупречным функционированием изделия и его оптимальным воздействием.

Просьба сохранять Правила в течение всего срока эксплуатации.

- Максимальный вес пользователя, 120 кг.
- Массажное кресло соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.
- Изделие не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение изделия и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.
- Во избежание несчастных случаев никогда не вставляйте пальцы между массажными головками.
- Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
- Избегайте попадания воды на изделие, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не используйте изделие с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре с привлечением квалифицированного персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите изделие от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.
- Дети могут пользоваться массажным креслом только под присмотром взрослых. Мы рекомендуем использовать детям старше 16 лет.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 30 минут.
- Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажным креслом.
- Любой массаж, даже руками, противопоказан, если Вы беременны или если область массажа подвержена одному из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для использования кресла в лечебных целях или при применении электрических вспомогательных средств (например, кардиостимуляторов) рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Перед установкой кресла необходимо убедиться, что оно не подключено к электросети.
- Перед установкой кресла необходимо оставить позади него достаточно места, чтобы его можно было перевести в лежачее положение.
- Снимать защитные чехлы с подлокотников следует только после полной установки кресла, чтобы избежать появления на них царапин и других повреждений.


- Не пользуйтесь массажным креслом непосредственно после приема пищи. Это может вызвать тошноту и неприятные ощущения.
- Если при использовании кресла у Вас появились болевые ощущения, обратитесь к врачу.
- Перед установкой кресла на легко повреждаемый пол, необходимо постелить на пол подкладку.
- Переносить кресло следует вдвоем

При отсутствии прямого запрета на массаж спины со стороны Вашего врача / ортопеда, Вы можете без опасений пользоваться массажным креслом. Интенсивность массажа увеличивается, если перевести кресло в лежачее положение. Рекомендуется сначала провести массаж в сидячем положении. Массаж ни в коем случае не должен вызывать неприятные ощущения.

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО KENNEDY 4 (КЕННЕДИ 4)

КОМПЛЕКТАЦИЯ (рис. 1)

- [1] - Подушечка для головы
- [2] - Подушечка для спины
- [3] - Подлокотник
- [4] - Пульт дистанционного управления
- [5] - Опора для голени
- [6] - Опора для стоп
- [7] - Подушка сиденья
- [8] - Колесики
- [9] - Спинка сиденья
- [10] - Подушка для плеч
- [11] - Динамик

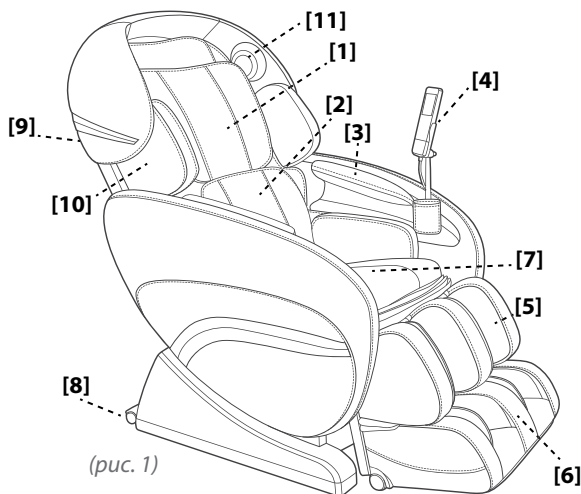


СБОРКА И УСТАНОВКА

- Для установки кресла Вам понадобится отвертка.
- При размещении массажного кресла оставьте 80 см свободного пространства за спинкой кресла, чтобы спинка кресла могла свободно откидываться назад.
- При установке деталей массажного кресла необходимо отключить кресло от источника питания.
- Во избежание царапин и повреждений кресла, удаляйте защитные покрытия с подлокотников только после его полной сборки.


1 Установите боковые панели

Присоедините боковые панели под углом 90° к нижней части массажного кресла при помощи четырех винтов, входящих в комплект.

Туго затяните винты.

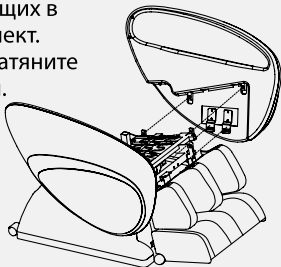**2 Установите подушку сиденья**




Используйте соединительные жгуты для закрепления подушки сиденья при помощи молний.

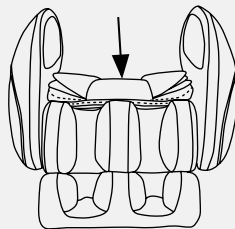**3 Установите спинку сиденья**


Приподнимите спинку сиденья и опустите ее так, чтобы она вошла в крепежные скобы сиденья, туго затяните болты с плоской головкой на обеих сторонах сиденья. *Схема [A]*

Соедините стяжку и U-образную вилку стяжки откидного механизма с заклепкой с плоской головкой и закрепите ее с помощью шплинта.


Схема [B]

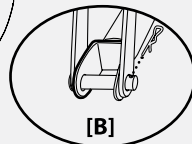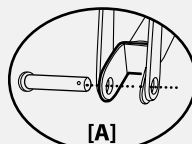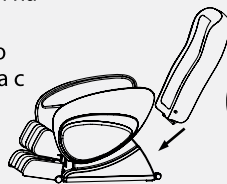**4 Присоедините штекеры**

Вставьте штекеры в соответствующие разъемы в сиденье согласно указанным обозначениям.

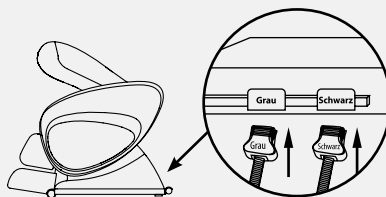
**5 Откиньте спинку сиденья**

Осторожно откидывайте спинку сиденья назад до тех пор, пока не услышите щелчок, свидетельствующий о том, что она установлена на свое место.

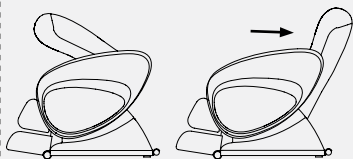**6 Присоедините подкладку спинки сиденья и подушечку**


Присоедините подкладку сиденья при помощи молнии [A]

Присоедините подушечку, используя застежки-липучки [B].

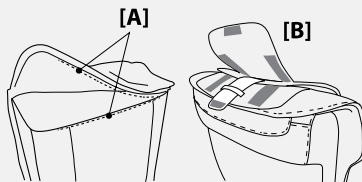


7 Установите пульт дистанционного управления

Установите пульт дистанционного управления в штатив, затянув винты.

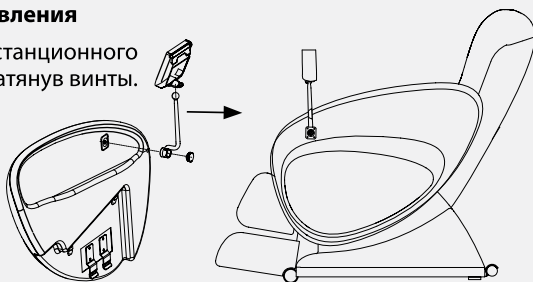

8 Присоедините кабель

Перед началом работы, убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на штепсельной вилке. Если Вы еще не присоединили кабель электропитания, присоедините его к массажному креслу [A], а затем поместите штепсельную вилку в штепсельную розетку. После этого включите массажное кресло, переместив выключатель в позицию «I» [B].

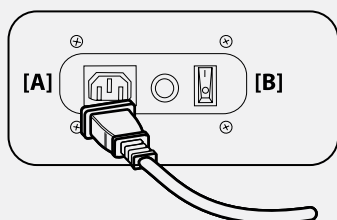

УПРАВЛЕНИЕ

(Смотри рис. 2 на 11 стр.)

[1] - ON/OFF (Вкл. /Выкл.)

Однократное нажатие кнопки включает подсветку пульта в мерцающем режиме: система массажного кресла переходит в режим ожидания. Чтобы начать сеанс массажа, нажмите кнопку выбранной программы массажа, при нажатии кнопки активируется таймер отсчета времени. При повторном нажатии кнопки Вкл/Выкл. сеанс массажа завершается. Все массажные ролики возвращаются в первоначальную позицию.

[2] - TIMER (Таймер)


Когда функция массажа активирована, таймер установлен на 15 минут. При каждом нажатии на эту кнопку, временной интервал будет

изменяться в циклической последовательности "20>25>30>5>10>15>20" минут. Примечание: Если нажать и удерживать кнопку таймера в течение 5 секунд, произойдет отключение звука контроллера. Чтобы включить звук, необходимо снова нажать на кнопку в течение 5 секунд.

[3] - PAUSE (Пауза)

Нажмите на кнопку, чтобы приостановить функцию массажа и работу таймера. В режиме пауза кнопка будет мигать. Повторное нажатие возобновит массаж и работу таймера.

Пульт Дистанционного Управления (ДУ)

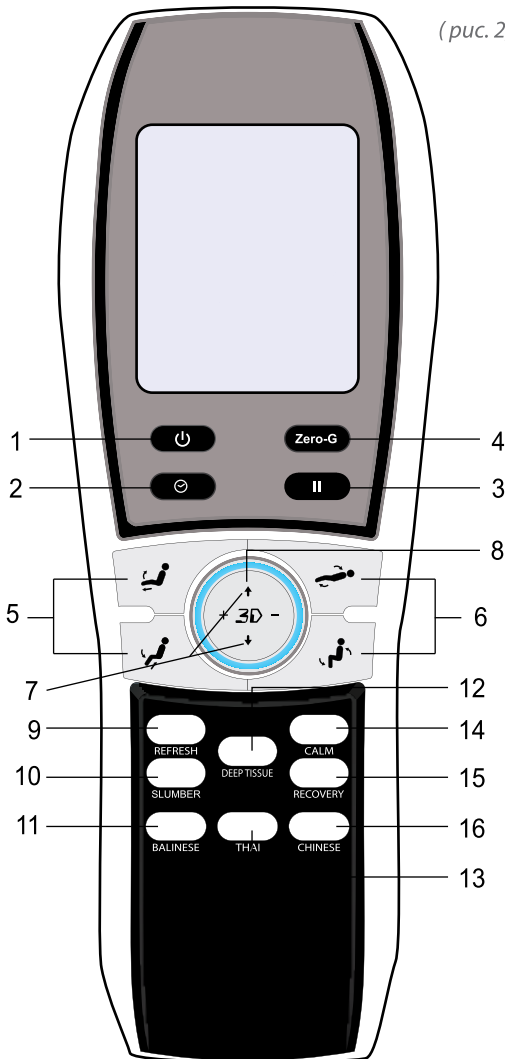


[4] - ZERO-G (функция невесомости)

Нажмите на кнопку, чтобы активировать функцию невесомости. Нажмите еще раз, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечание: Кнопка ZERO-G недоступна в режимах автоматических программ Slumber (Сон) и Thai (Тайский массаж).

(рис. 2)

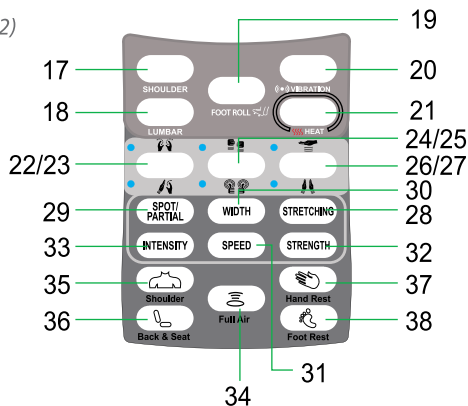

[5] - Кнопки управления углом наклона подножки.

Нажмите на кнопки, чтобы регулировать угол наклона подножки до удобного вам положения. Нажмите на кнопку повторно, чтобы остановить движение подножки.

» Кнопка регулировки длины подножки

Нажимая и удерживая одну из этих двух кнопок, можно отрегулировать удобную вам длину подножки.

[6] - INCLINE/RECLINE (наклон/поднятие).

Нажатие на кнопки позволяет отрегулировать угол наклона. Нажмите один раз, чтобы установить спинку кресла и подножку в удобное для вас положение.

[7] - Кнопка регулировки высоты спинки кресла. ↑↓

Нажимайте кнопку чтобы установить точную регулировку роста в течение 10 секунд после того, как раздастся сигнал, если автоматическая система сканирования роста не определила желаемый вами размер. Массажный ролик будет двигаться вверх и вниз, отпускайте кнопку, как только ролик достигнет желаемого

[8] - 3D ADJUSTMENT (настройка 3D массажа)

Нажимайте на кнопку "+" чтобы настроить 3D массаж, ролик будет двигаться вперед, реагируя на каждое нажатие, нажатие 5 раз обеспечит самое выступающее положение. Нажатие кнопки "-" постепенно вернет ролик в первоначальное положение.

Автоматические программы для массажа всего тела

Если одна из 10 автоматических программ активирована, кресло автоматически определяет высоту плеч и сканирует изгиб тела. Пользователь также может вручную установить удобное для себя положение для массажа.

[9] – REFRESH (Обновление)

[10] – SLUMBER (Сон)

[11] – BALINESE (Балийский)

[12] – DEEP TISSUE (Глубокий)

[13] – THAI (Тайский)

[14] – CALM (Успокаивающий)

[19] - FOOT ROLL (Роликовый массаж ступней)

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать ритмичный ритмичный роликовый массаж ступней, нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить массаж ступней.

Примечание: Во время массажа в автоматическом режиме, нажатие на кнопку также включает и выключает массаж ступней.

[20] – VIBRATION (Вибрация)

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать ритмичную вибрацию сиденья, нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить вибрацию сиденья.

[15] – RECOVERY (Восстанавливающий)

[16] – CHINESE (Китайский)

[17] – SHOULDER (Массаж плеч)

[18] – LUMBAR (Массаж поясницы)

Примечание: LUMBAR массаж противопоказан пожилым людям.

Примечание: Во время массажа в автоматическом режиме, нажатие на кнопку также включает и выключает вибрацию.

[21] – HEAT (Прогрев)

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать функцию прогрева, нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить функцию прогрева.

Примечание: Во время массажа в автоматическом режиме, нажатие на кнопку также включает и выключает прогрев поясничной зоны.

Ручная установка массажных программ

[22] – KNEADING (Разминающий массаж)

Кнопка включения/выключения режима разминающего массажа. В этом режиме вы можете выбрать 1 из 5 уровней скорости. Нажмите на кнопку, чтобы активировать ритмический режим 1, массаж средней силы. Чтобы активировать режим 2, нажмите на кнопку еще раз. Нажмите на кнопку третий раз, чтобы завершить работу в режиме разминающего массажа и переключиться в режим 1 - Шведский массаж.

[23] – SWEDISH (Шиаци – точечный массаж)

Кнопка включения/выключения режима шведского массажа – доступны 5 скоростных режимов (Speed). Однократное нажатие данной кнопки запускает режим шведского массажа всей спины. Для остановки необходимо повторно нажать кнопку.

[24] – TAPPING (Постукивающий массаж)

Кнопка включения/выключения режима постукивающего массажа. В этом режиме вы можете выбрать 1 из 3 вариантов расстояния (ширины/Width) между массажными роликами и 5 уровней скорости.

[25] – SHIATSU (Шиаци, точечный массаж)

Кнопка включения/выключения режима шиаци массажа – доступны 5 скоростных режимов (Speed) и 3 режиме регулировки ширины роликов(Width). Для остановки необходимо повторно нажать кнопку.

[26] – CLAPPING (Похлопывающий массаж)

Кнопка запуска/остановки режима похлопывающего массажа - 3 уровня ширины площади массажа, может быть выбрано 5 уровней скорости.

[27] – ROLLING (Роликовый массаж)

Кнопка запуска/остановки роликового массажа - можно выбрать 3 уровня ширины роликов. Во время работы кресла в режиме 2, похлопывающий массаж, нажмите на кнопку, чтобы активировать режим роликового массажа спины. Повторное нажатие прекратит работу в режиме роликового массажа. Чтобы активировать эту функцию напрямую, нажмите на кнопку 3 раза подряд в режиме ожидания.

Примечание: эта функция не может выполнять режим точечный массаж (SPOT)

[28] – STRETCHING (Растягивающий массаж)

Кнопка включения/выключения режима растягивающего массажа. В данном режиме вы можете выбрать 3 уровня регулировки ширины роликов. Повторное нажатие прекратит работу режима растягивающего массажа.

[29] – SPOT/PARTIAL (Местный/частичный массаж)

Местный или частичный массаж спины. Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать локальный /местный массаж, в то же время прежний режим массажа продолжит работу в последнем положении. Нажмите кнопку еще раз, чтобы активировать режим частичного массажа.
Примечание: При включении режима частичного массажа, последняя позиция будет принята в качестве центральной, и массаж продолжится в области радиусом примерно 8 см от этой позиции.

[30] – WIDTH (Ширина)

Кнопка выбора ширины площади воздействия в режимах постукивающий, похлопывающий, шиаци и роликовый массаж. Во время работы кресла в режиме Clapping, Rolling, Shiatsu, Tapping, каждое нажатие будет менять ширину в циклической последовательности - узкая, средняя, широкая.

[31] – SPEED (Скорость)

Кнопка регулирования скорости для режимов Tapping, Clapping, Shiatsu, Swedish, каждое нажатие на кнопку будет менять скорость массажа в циклической последовательности "Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5".

[32] – STRENGTH (Сила массажа)

Кнопка настройки силы массажа в режиме Kneading. Каждое нажатие на кнопку будет менять интервал скорости и силы массажа в циклической последовательности "Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5".

Настройка воздушно-компрессионного массажа

[33] -INTENSITY (Интенсивность воздушно-компрессионного массажа)

Этой кнопкой вы можете регулировать уровень интенсивности воздушного потока при воздушном (компрессионном) массаже. Каждое нажатие на кнопку будет менять интенсивность давления воздуха в циклической последовательности "Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5".

[34] – FULL AIR (Воздушно-компрессионный массаж всего тела)

Нажатие данной кнопки запускает/выключает автоматическую программу воздушно-компрессионного массажа всего тела. Вы можете выбрать 1 из 5 уровней интенсивности (Intensity).

[35] – SHOULDER (Воздушно-компрессионный массаж плеч и верхней части спины)

Нажатие данной кнопки запускает/выключает автоматическую программу воздушно-компрессионного массажа в области плеч и верхней части спины. Вы можете выбрать 1 из 5 уровней интенсивности (Intensity).

[36] – BACK & SEAT (Воздушно-компрессионный массаж спины и ягодиц)

Нажатие данной кнопки запускает/выключает автоматическую программу воздушно-компрессионного массажа в области спины и ягодиц. Вы можете выбрать 1 из 5 уровней интенсивности (Intensity).

[37] – HAND REST (Воздушно-компрессионный массаж рук)

Нажатие данной кнопки запускает/выключает автоматическую программу воздушно-компрессионного массажа в области рук. Вы можете выбрать 1 из 5 уровней интенсивности(Intensity).


[38] – FOOTREST (Воздушно-компрессионный массаж "отдыха ног")

Кнопка управления воздушно-компрессионным массажем ног. Доступно 5 уровней интенсивности массажа. Для остановки работы программы, нажмите на кнопку еще раз.

Finish Operating (окончание работы)

Нажмите на кнопку "ON/OFF" (вкл./выкл.) после использования. Массажные ролики вернуться в исходное положение, затем переключите тумблер питания в положение "0", расположенный под креслом и отсоедините шнур электропитания от розетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

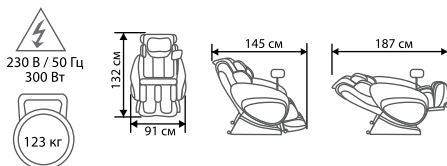


Размеры: 145 x 91 x 132 см
Угол наклона спинки: от 115° до 160°
Угол наклона подножки: от 0° до 90°
Вес: 123 кг.
Напряжение: 230В/50Гц
Мощность: 300 Вт
Время работы: ручной режим – 30 мин.
автоматический режим – 15 мин.

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО BISMARCK II (БИСМАРК 2)

КОМПЛЕКТАЦИЯ (рис. 3)

- [1] - Подушка для спины
- [2] - Подголовник
- [3] - Валик для сиденья
- [4] - Втулка
- [5] - Запирающая скоба
- [6] - Пульт дистанционного управления
- [7] - Спинка сиденья
- [8] - Колёсики
- [9] - Опора для ног
- [10] - Боковая панель
- [11] - Подлокотник
- [12] - Карман для пульта ДУ

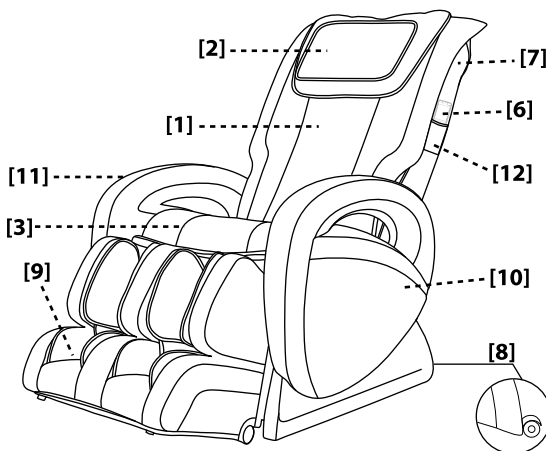


(рис. 3)



СБОРКА И УСТАНОВКА

- При размещении массажного кресла оставьте 80 см свободного пространства за спинкой кресла, чтобы спинка кресла могла свободно откидываться назад. (рис. 4)
- При установке деталей массажного кресла необходимо отключить кресло от источника питания
- Во избежание царапин и повреждений кресла, удаляйте защитные покрытия с подлокотников только после его полной сборки.

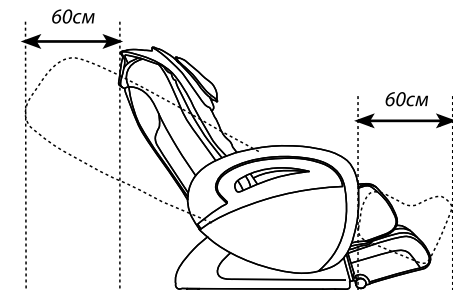

(рис. 4)

УПРАВЛЕНИЕ

(рис. 5)

Подключите к электрической сети и установите переключатель в позицию "I". Сейчас кресло находится в режиме ожидания, кнопка POWER (питание) мигает. В режиме ожидания возможно управление 5 функциями, включая: питание, наклон подножки, возвращение подножки в исходное положение, наклон спинки, поднятие спинки в исходное положение.

[1] - POWER (Питание)

Нажмите кнопку питания, кресло автоматически примет нужное положение. Затем нажмите любую кнопку, чтобы выбрать необходимый режим массажа. Одновременно с этим начинает работу таймер. Нажмите еще раз, чтобы остановить массаж, угол наклона кресла вернется в исходное положение. Во время этого, пользователь не может возобновить работу кресла, пожалуйста, подождите несколько секунд, чтобы начать заново.

Замечание: Длина подножки может быть отрегулирована вручную, для этого просто давите на подножку ногами до нужной вам длины.

[2] - Pause (Пауза/временная остановка работы кресла)

При однократном нажатии на кнопку Пауза, жидкокристаллический дисплей начнет мигать. Массажные функции и работа таймера будут приостановлены. Нажмите еще раз, чтобы возобновить массаж.

[3] - TIMER (таймер)

По умолчанию таймер массажа установлен на 15 мин. Нажимайте на кнопку каждый раз, чтобы изменить время массажа в следующей овальности: 20>25>30>5>10>15. Максимальное установленное время массажа 30 минут.

[4] - CLASSIC I (Классический I)

Нажмите кнопку один раз, начнет работу данная программа. Вначале массажное кресло автоматически



(рис. 5)

выполнит сканирование высоты спины. После этого, пульт ДУ трижды издаст звуковой сигнал, чтобы уведомить пользователя об окончании сканирования, возможна ручная установка параметров высоты путем нажатия на кнопки UP/DOWN (вверх/вниз).

Далее массажное кресло переходит в горизонтальное положение для начала автоматической программы.

Эта автоматическая программа включает в себя комбинацию нескольких способов массажа, включая разминающий массаж, постукивающий массаж, роликовый массаж, Шиатсу - точечный массаж, Шведский массаж, массаж двойного действия, стартует по всему телу, начиная с головы и вниз, к пояснице, особым образом уделяя внимание ягодицам.

На заметку: Автоматическая программа **CLASSIC I** (класическая 1) может начать работу только после того, как спинка кресла отклонится в горизонтальное положение, пользователь не может менять угол наклона спинки в данном режиме.

[5] - CLASSIC II (Класическая 2)

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать автоматическую программу CLASSIC II. Массажный механизм сосредоточится на зоне спины, в сочетании с компрессионным массажем всего тела, и пользователь может наслаждаться полным расслаблением.

На заметку: Во время работы в этом режиме пользователь может изменять угол наклона подножки и спинки кресла по своему усмотрению.

[6] - UNIQ (Уникальная)

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать эту программу. Сначала массажное кресло примет горизонтальное положение. Массажные ролики переместятся в спинке кресла к зоне ягодиц, и массаж будет сосредоточен в области поясницы и ягодиц.

На заметку:

- 1) Угол наклона массажного кресла не может быть изменен в этом режиме.
- 2) UNIQ является программой мульти-выбора, с возможностью автоматической и ручной установки программы.

Пользователь может выбрать автоматический вариант, с комбинацией различных видов массажа: разминающий, постукивающий, шведский, Шиатсу-точечный, двойное действие и роликовый массаж. Также пользователь может выбрать функцию ручной настройки, воспользовавшись кнопкой "MASSAGE MODE".

[7]- HEAT (Прогрев)

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать функцию прогрева поясницы. Еще раз нажмите на кнопку чтобы выключить прогрев.

[8] - FEET (Стопы ног)

Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать функцию компрессионного массажа ступней ног. Повторное нажатие на кнопку, выключит эту функцию.

Замечание:

- 1) В автоматических режимах "CLASSIC I", "CLASSIC II" и "UNIQ", функция массажа ступней ног встроена по умолчанию. Если пользователь хочет отменить ее или начать заново, нужно нажать кнопку FEET.
- 2) Предусмотрено 3 уровня интенсивности массажа ступней, пользователь может осуществить выбор, нажимая кнопку FEET, по умолчанию идут следующие уровни Start (Level 1)---Level 2---Level 3—Stop—Start (Level 1)".
Старт(Уровень 1)--Уровень 2--Уровень 3--Стоп-- Старт (Уровень 1).

[9] - MASSAGE MODE (Режим массажа)

Эта функция позволяет пользователю выбрать режим массажа из 6 имеющихся- разминающий, постукивающий, шведский, шиатсу, двойное действие и роликовый массаж.

[10] - VIBRATION (Вибрация)

С помощью этой кнопки, можно включить или выключить функцию вибрации в сиденье кресла.

[11] - SPOT (Местный массаж)

При помощи этой функции вы можете выбрать функцию массажа для любой точки спины, исходя из ваших пожеланий. Повторное нажатие возобновляет массаж всей спины. Эта функция доступна во всех режимах массажа. При длительном нажатии на эту кнопку, ролики пойдут вверх. Отпустите кнопку, чтобы подтвердить выбранную позицию.

[12] - PARTIAL (Частичный массаж спины)

С помощью данной кнопки, вы можете настроить массаж определенной области тела. Нажмите один раз, чтобы активировать функцию. Нажмите повторно, чтобы вернуться к полному массажу спины. Эта функция доступна в любом ручном режиме. При длительном нажатии на эту кнопку ролики пойдут вниз. Отпустите кнопку, чтобы подтвердить выбранную позицию.


[13] - STRENGTH (Сила массажа)

Данная кнопка, позволяет регулировать силу массажа.


[14] - WIDTH (Регулировка ширины расстояния между роликами)

Позволяет регулировать ширину расстояния между роликами. Доступно 3 уровня - узкий, нормальный и широкий. Работа функции возможна, только в режимах массажа Tapping, Shiatsu, Rolling.


[15]- FOOTREST RECLINE/ RESTORE (Наклон/Возврат в исходное положение подножки)

 Кнопки контроля угла наклона подножки. При однократном нажатии, угол наклона начинает изменяться. Повторное нажатие фиксирует угол наклона.

[16] - BACKREST RECLINE/RE-STORE (Наклон/Возврат в исходное положение спинки кресла)

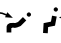 Кнопки контроля угла наклона спинки кресла. При однократном нажатии, угол наклона начинает изменяться. Повторное нажатие фиксирует угол наклона, удобный для вас.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

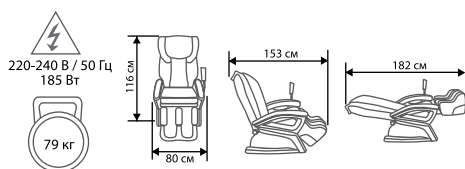


Размеры: 153 x 80 x 116 см
 Угол наклона спинки: до 140°
 Угол наклона подножки: от 0° до 90°
 Вес: 79 кг.
 Напряжение: 220-240В/50Гц
 Мощность: 185 Вт
 Время работы: ручной режим – 30 мин.
 автоматический режим – 15 мин.

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО SMART 3 S + МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ ОТТОМАН (СМАРТ 3 С + ОТТОМАН)

КОМПЛЕКТАЦИЯ (рис. 6)

- [1] - Спинка кресла
- [2] - Подушка под спину
- [3] - Боковины
- [4] - Подушка сиденья
- [5] - Подлокотники
- [6] - Подставка/массажёр для ног
- [7] - Музыкальные колонки

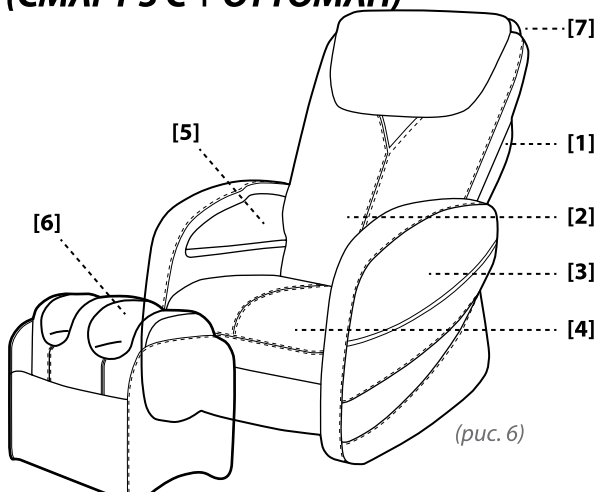

ПОКОЛАЧИВАЮЩИЙ
МАССАЖ



РОЛИКОВЫЙ
МАССАЖ



ВИБРАЦИЯ



КОМПРЕССИОННЫЙ
МАССАЖ



РАЗМИНАЮЩИЙ
МАССАЖ



ШВЕДСКИЙ
МАССАЖ



DUAL-ACTION



ПРОГРЕВ

СБОРКА И УСТАНОВКА

- При установке кресла необходимо оставить позади него достаточно места, чтобы его можно было перевести в лежачее положение (не менее 40 см).

- Следите за тем, чтобы кресло во время сборки было отсоединено от электросети


- Вставьте спинку с помощью имеющихся соответственно слева и справа стальных головок в предусмотренные для этого крепления внутри сиденья кресла.

- Соедините швеллер спинки с соединительной штангой под сиденьем с помощью прилагаемого болта [A]. Закрепите болт шплинтом [B].


- Присоедините сетевой блок к штекеру на задней части кресла

- Соедините сетевой блок с сетевым кабелем и вставьте его в розетку.

Включите кресло, установив переключатель в положение **I**.

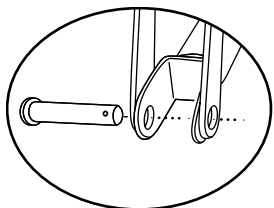

[A]

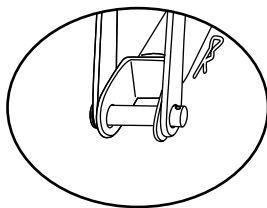

[B]

УПРАВЛЕНИЕ

При необходимости можно регулировать интенсивность массажа. Кроме этого, массажные головки можно установить в режим местного и точечного массажа. Вибрация сиденья усиливает эффект массажа.

Дополнительная приставка для ног Ottoman, обеспечивает массаж икроножных мышц и подошв за счет компрессии и вибрации, что обеспечивает полное мышечное расслабление.

Массажные ролики выполнены с фиксаторным механизмом, усиливающим массаж акупунктурных точек.

Пульт управления Smart 3

(Смотрите рис. 7)

[1] - Power

Включение и выключение массажного кресла

[2] - Music Sync

Включение и выключение музыкального сопровождения. Функция "Music Sync", автоматически подстраивает массаж кресла под музыкальный ритм из колонок. Для работы функции, необходимо подключение источника звука через разъем 3,5"

[3] - Upper back

Массаж верхней части спины

[4] - Lower back

Массаж поясничной области спины

[5] - Full back

Полный массаж всей спины

[6] - Rolling

Включение и выключение роликового массажа. Дополнительные функции: Partial, Width

[7] - Kneading

Включение и выключение разминающего массажа. Дополнительные функции: Partial, Spot, Intensity

[8] - Tapping

Включение и выключение поколачивающего массажа. Дополнительные функции: Partial, Spot, Intensity

[9] - Kneading & Tapping (Dual-Action)

Включение и выключение комбинации разминающего и поколачивающего массажа. Дополнительные функции: Partial, Spot, Width, Intensity

[10] - Partial

С помощью этой функции можно производить массаж любого участка тела шириной около 8 см: затылочную часть головы, поясничной части позвоночника

[11] - Spot

С помощью этой кнопки можно вручную настроить точечный массаж. При повторном нажатии продолжается массаж всей спины

[12] - ▲▼ Положение массажных роликов

С помощью этих кнопок можно устанавливать ролики на нужный участок спины во время точечного массажа.

[13] - Width


Регулируется расстояние между массажными роликами в трех различных положениях

[14] - Intensity

С помощью этой кнопки можно регулировать интенсивность массажа

[15] - Seat vibration

Этой кнопкой включается вибрация сиденья с регулировкой по двум степеням. При повторном нажатии кнопки функция выключается. Для изменения силы вибрации, дважды нажмите на кнопку.

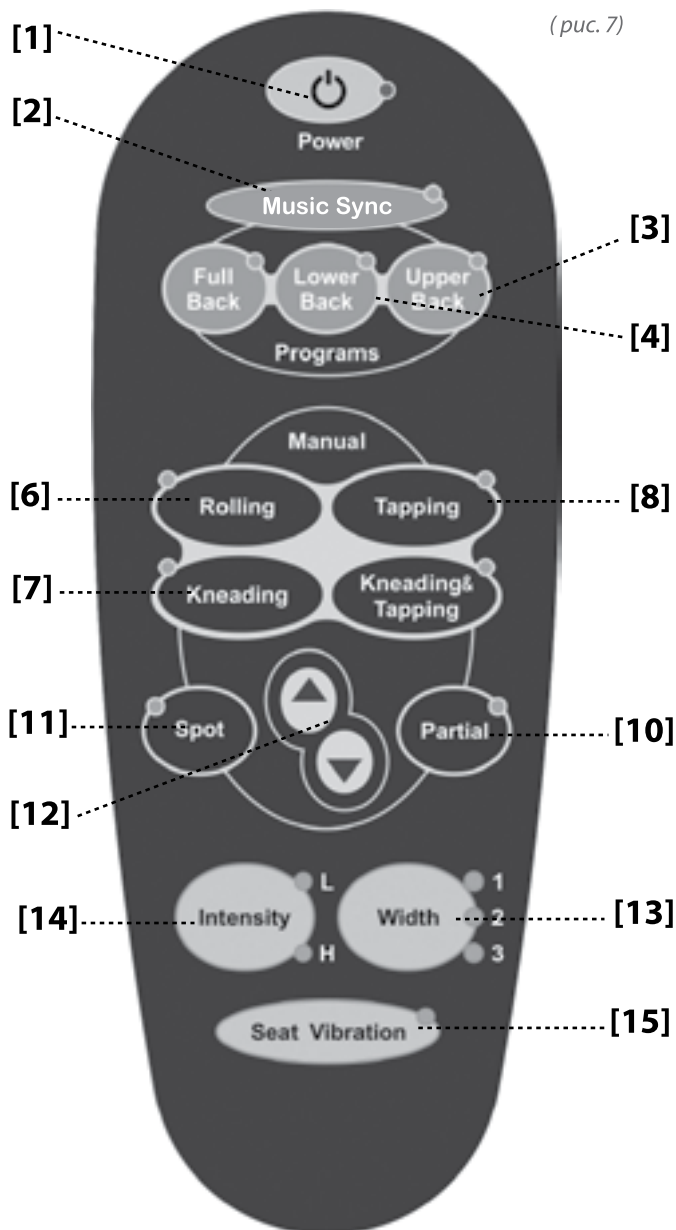

Пульт управления Ottoman

(рис. 8)

[1] - Air Squeezing (воздушно-компрессионный массаж)


Эта кнопка включает и выключает компрессионный массаж.

[2] - Heat (Прогрев)

Включение/выключение прогрева. Включение и выключение функции прогрева.


[3] - Vibration (вибромассаж)

Включение/выключение вибромассажа.

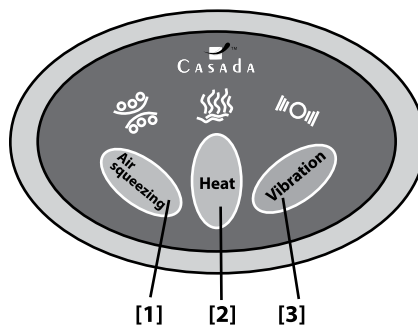

(рис. 8)

Оттоман может использоваться просто в качестве подставки для ног. Для этого необходимо потянуть за ручку [A], повернуть массажную вставку [B] на 180° и отпустить ручку до ее защелкивания. (рис. 9)

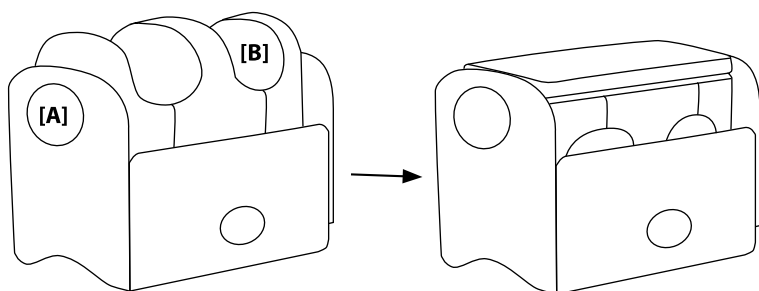


Оттоман в положении массажа

Оттоман как подставка для ног

(рис. 9)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

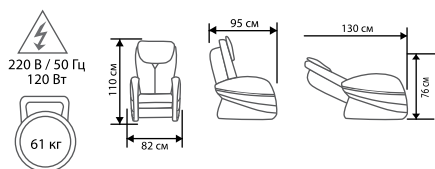

SMART 3 S:

Размеры в положении для сидения: 95 x 82 x 110 см

Размеры в положении для лежания: 130 x 82 x 76 см

Угол наклона спинки: до 175°

Вес: 61 кг.

Напряжение: 220В/50Гц

Мощность: 120 Вт

Время работы: ручной режим – 30 мин.
автоматический режим – 15 мин.

OTTOMAN:

Размеры: 55 x 35 x 42 см

Вес: 11,2 кг.

Напряжение: 220В/50Гц

Мощность: 35 Вт

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО SENSO 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ (рис. 10)

- [1] - Подушка
- [2] - Ручка для регулировки спинки и подножки
- [3] - Сиденье
- [4] - Регулируемая подножка
- [5] - Подлокотник
- [6] - Спинка
- [7] - Съемная подушка для спины




РОЛИКОВЫЙ
МАССАЖ



ВИБРАЦИЯ



РАЗМИНАЮЩИЙ
МАССАЖ

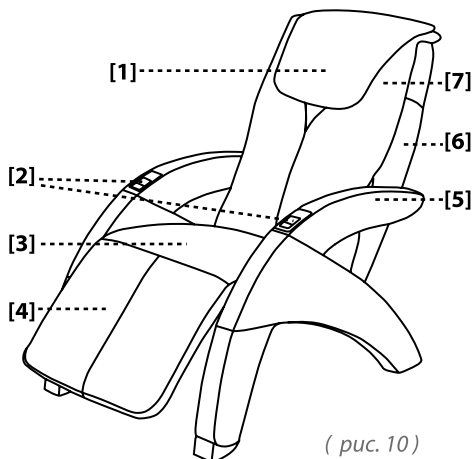


(рис. 10)


СБОРКА И УСТАНОВКА

- При установке кресла в вертикальное положение, проследите за тем, чтобы за ним имелось достаточно места для полного раскрытия до положения лежа. (рис. 11)


- Следите за тем, чтобы кресло во время сборки было отсоединено от электросети.

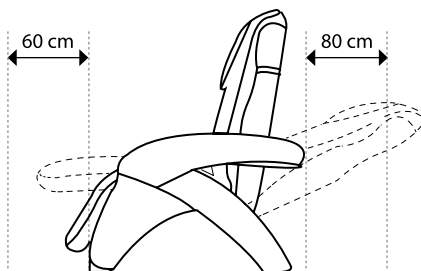

(рис. 11)

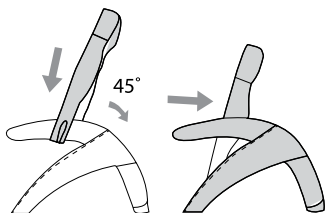

(рис. 12)

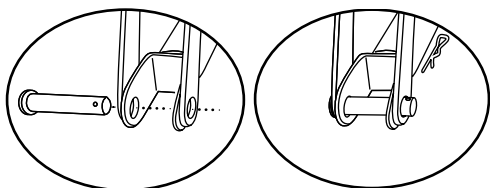

[A]

(рис. 13)

[B]

1 Установите спинку сиденья

Вставьте спинку с помощью имеющихся соответственно слева и справа стальных головок в предусмотренные для этого крепления внутри сиденья кресла. (рис. 12)

Соедините швеллер спинки с соединительной штангой под сиденьем с помощью прилагаемого болта [A]. Закрепите болт шплинтом [B].



(рис. 13)

2 Подключение к сети

Присоедините сетевой блок к штекеру на задней части кресла.

Соедините сетевой блок с сетевым кабелем и вставьте его в розетку.

До начала эксплуатации проверьте сетевой штекер. Соедините сетевой кабель с креслом [A] и в, наконец, вставьте сетевой штекер в розетку. Теперь включите кресло, установив переключатель в положение I [B].

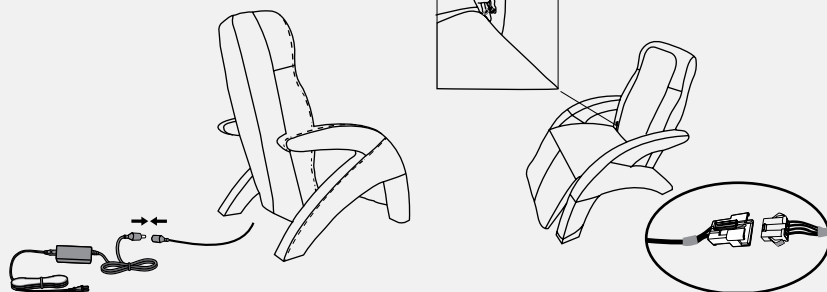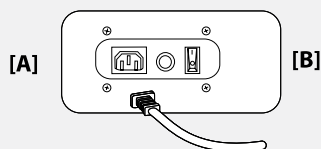

УПРАВЛЕНИЕ

(Смотри рис. 14 на 25 стр.)

[1] - Power (Включить / Выключить)

С помощью кнопки «Power» Вы включаете Senso 2, до этого момента кресло находится в нейтральном положении. Для старта выберите одну функцию массажа. Для остановки массажа повторно нажмите на данную кнопку. Массажные головки автоматически перейдут в исходную позицию.

[2] - Pause (Пауза)

Во время массажа Вы можете в любой момент ненадолго прервать программу с помощью кнопки «Pause». В это время кресло находится в нейтральном положении, при этом можно отрегулировать только положение лежа и область ног. Для продолжения массажа снова нажмите на кнопку «Pause».


Автоматические программы для всей спины

[3] - Relax (Релаксация)

Нажатием данной кнопки запускается программа. В режиме Relax производится массаж всей спины и активируется вибрация в области сиденья и в области ног. Превосходно подходит для расслабления.

[4] - Therapy (Терапия)

Нажатием данной кнопки запускается программа. В режиме Therapy производится массаж всей спины и активируется вибрация в области сиденья и в области ног. Уменьшает мышечное напряжение.

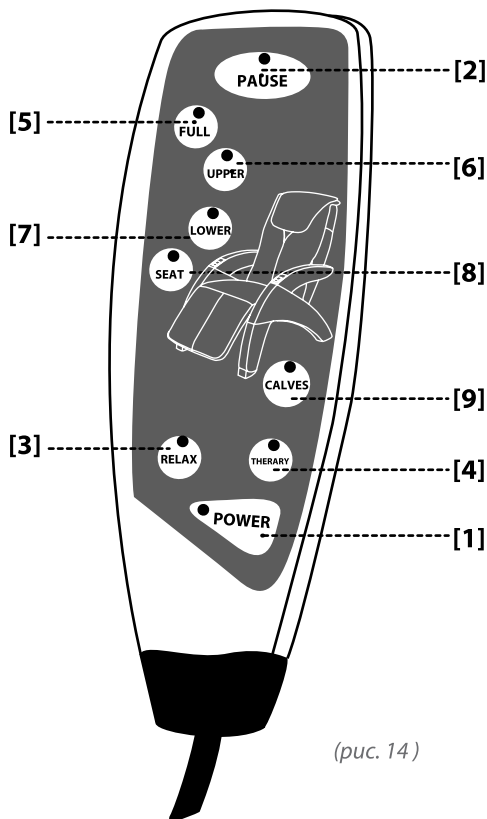

(рис. 14)

Ручные программы для всей спины

[5] - Full (Весь)

С помощью данной кнопки активируется массаж всей спины.

[6] - Upper (Верх)

С помощью данной кнопки активируется массаж верхней части спины.

[7] - Lower (Низ)

С помощью данной кнопки активируется массаж нижней части спины.


[8] - Seat (Сиденье)

Нажатием данной кнопки активируется вибрация в области сиденья. Однократным нажатием включается непрерывный режим вибрации, двукратным нажатием включится режим вибрации с интервалом. Вибрация может комбинироваться со всеми ручными программами.

[9] - Calves (Икры)

Нажатием данной кнопки активируется вибрация в области икр. Однократным нажатием включается непрерывный режим вибрации, двукратным нажатием включается режим вибрации с интервалом. Вибрация может комбинироваться со всеми ручными программами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

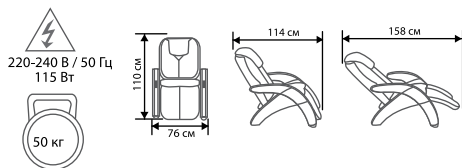

Размеры в положении для сидения: 114 x 76 x 110 см

Размеры в положении для лежания: 158x 76x 80 см

Вес: 50 кг.

Напряжение: 220-240В/50Гц


Мощность: 115 Вт

Время работы: ручной режим – 30 мин.

автоматический режим – 15 мин.

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО SENATOR 2 (СЕНАТОР 2)

КОМПЛЕКТАЦИЯ (рис. 15)

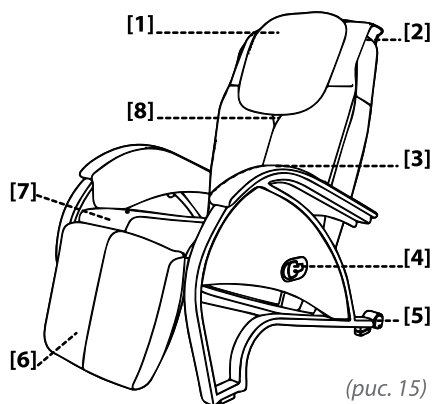

(рис. 15)

- [1] - Подушка
- [2] - Спинка
- [3] - Подлокотник
- [4] - Ручка для регулировки спинки
- [5] - Колеса
- [6] - Регулируемая подножка
- [7] - Сиденье
- [8] - Съемная подушка для спины



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ




ВИБРАЦИЯ



РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ

СБОРКА И УСТАНОВКА

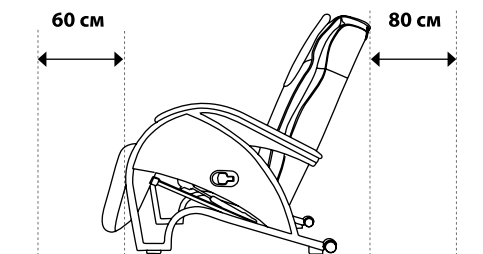

(рис. 16)


- При установке кресла в вертикальное положение, проследите за тем, чтобы за ним имелось достаточно места для полного раскрытия до положения лежа. (рис. 16)

- Следите за тем, чтобы кресло во время сборки было отсоединено от электросети.


1 Установите спинку сидения

Вставьте спинку с помощью имеющихся соответственно слева и справа стальных головок в предусмотренные для этого крепления внутри сиденья кресла. (рис. 17)

Соедините швеллер спинки с соединительной штангой под сиденьем с помощью прилагаемого болта [A]. Закрепите болт шплинтом [B]. (рис. 18)

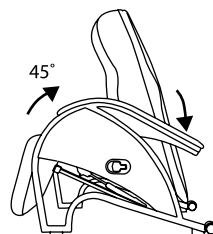

(рис. 17)

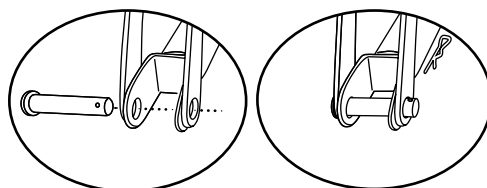

[A]

(рис. 18)


[B]

2 Подключение к сети

Присоедините сетевой блок к штекеру на задней части кресла.

Соедините сетевой блок с сетевым кабелем и вставьте его в розетку.

До начала эксплуатации проверьте сетевой штекер. Соедините сетевой кабель с креслом [A] и вставьте сетевой штекер в розетку. Теперь включите кресло, установив переключатель в положение I [B].

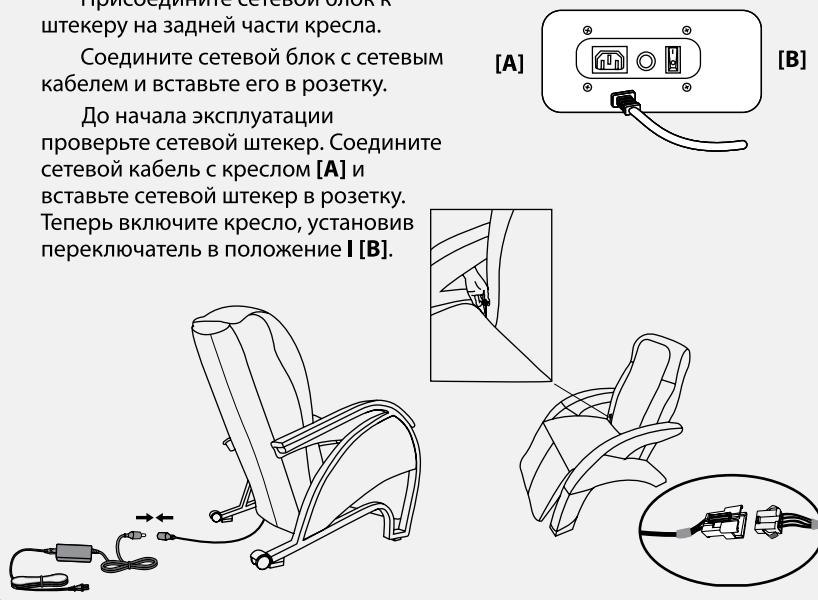

УПРАВЛЕНИЕ

(Смотри рис. 19 на 28 стр.)

[1] - Power (Включить / Выключить)

С помощью кнопки «Power» Вы включаете Senator II, до этого момента кресло находится в нейтральном положении. Для старта выберите одну функцию массажа. Для остановки массажа повторно нажмите на данную кнопку. Массажные головки автоматически перейдут в исходную позицию.

[2] - Pause (Пауза)

Во время массажа Вы можете в любой момент ненадолго прервать программу с помощью кнопки «Pause». В это время кресло находится в нейтральном положении, при этом можно отрегулировать только положение лежа и область ног. Для продолжения массажа снова нажмите на кнопку «Pause».


Автоматические программы для всей спины

[3] - Relax (Релаксация)

Нажатием данной кнопки запускается программа. В режиме Relax производится массаж всей спины и активируется вибрация в области сиденья и в области ног. Превосходно подходит для расслабления.

[4] - Therapy (Терапия)

Нажатием данной кнопки запускается программа. В режиме Therapy производится массаж всей спины и активируется вибрация в области сиденья и в области ног. Уменьшает мышечное напряжение.

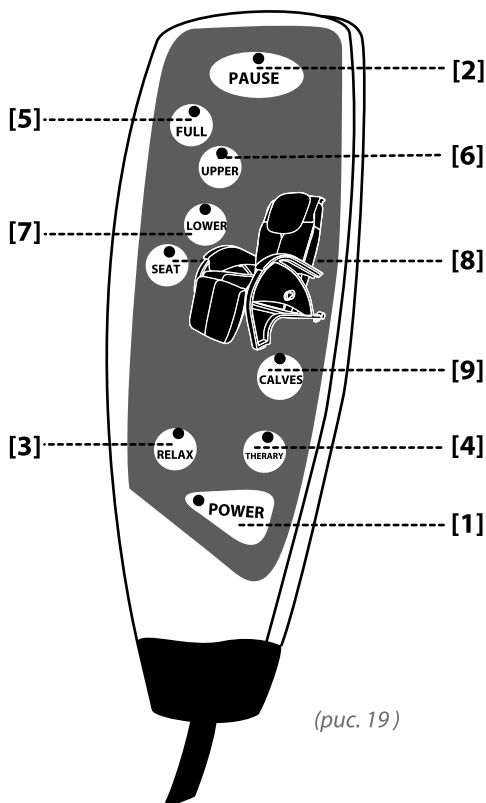

(рис. 19)

Ручные программы для всей спины

[5] - Full (Весь)

С помощью данной кнопки активируется массаж всей спины.

[6] - Upper (Верх)

С помощью данной кнопки активируется массаж верхней части спины.

[7] - Lower (Низ)

С помощью данной кнопки активируется массаж нижней части спины.

[8] - Seat (Сиденье)


Нажатием данной кнопки активируется вибрация в области сиденья. Однократным нажатием включается непрерывный режим вибрации, двукратным нажатием включится режим вибрации с интервалом. Вибрация может комбинироваться со всеми ручными программами.

[9] - Calves (Икры)

Нажатием данной кнопки активируется вибрация в области икр. Однократным нажатием включается непрерывный режим вибрации, двукратным нажатием включается режим вибрации с интервалом. Вибрация может комбинироваться со всеми ручными программами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220-240 В / 50 Гц
115 Вт

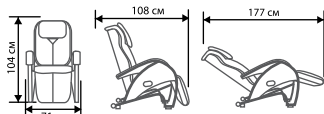

Размеры в положении

для сидения: 108 x 71 x 104 см

Размеры в положении

для лежания: 177 x 71 x 104 см

Вес: 50 кг.

Напряжение: 220-240В/50Гц

Мощность: 115 Вт

Время работы: ручной режим – 30 мин.

автоматический режим – 15 мин.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ
1 Кресло подключено к сети питания, но ни само кресло, ни пульт дистанционного управления не работают.	- Проверьте присоединение к сетевому кабелю - Убедитесь, что переключатель на кресле установлен в положении I.
2 Пульт дистанционного управления функционирует, но кресло не реагирует.	- При очень долгом использовании кресло может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-50 минут.

УХОД И ХРАНЕНИЕ**Уход за изделием**

Вы приобрели товар, изготовленный из высококачественных материалов, требующих соответствующего ухода. Регулярно обрабатывайте поверхности с помощью средств по уходу, и ваше кресло прослужит вам длительный срок. Вы можете использовать средства, разработанные для ухода за виниловыми и кожаными изделиями.

Хранение

1. Рекомендуемый способ хранения: в сухом и защищенном от пыли месте, со свернутым шнуром.
2. Храните вдали от нагревательных приборов или источников открытого огня. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

На все изделия, описанные в данном буклете, продавец предоставляет гарантийный срок, предусмотренный законом. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки подтверждается чеком.

Все условия предоставления гарантии и обслуживания описаны в гарантийном талоне.



Производитель:

Casada GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderbon, Germany
Tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0
web: www.casada.de
mail: info@casada.de

Эксклюзивный представитель в России:

ООО «Альфа БС»
109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1
тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33
Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru




ДЛЯ ЗАМЕТОК



A series of horizontal dashed lines for taking notes.

Декларация соответствие с требованиями ЕС:
директив 2006 / 95 / ЕС

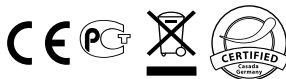

Фотографии и тексты публикации защищены авторским правом компании «Casada International GmbH» и не подлежат использованию в других целях без ясно выраженного подтверждения. Информация в инструкции, о комплектации товара и его функциональных особенностей, может измениться без уведомления покупателя фирмой поставщиком.



Kennedy 4



Bismarck 2



Smart III S + Ottoman



Senso II



Senator II

Телефон горячей линии в России:

8 800 250 10 20

(звонок бесплатный)