


SELF HEATING PAD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- [1] Ортопедический корсет
- [2] Сменная подкладка с турмалиновыми кристаллами
- [3] Сменная подкладка с биомагнитами

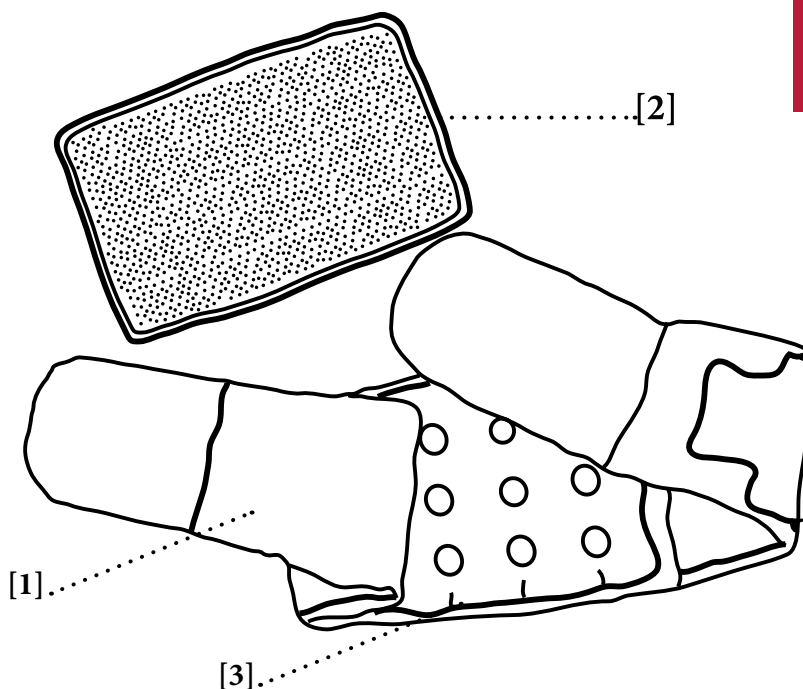

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации пояса внимательно прочтите следующие указания, чтобы достичь оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

- Ортопедический турмалиновый корсет с функцией самопрогрева соответствует общепринятым современным требованиям к безопасности.
- Корсет не требует специального обслуживания.
- Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию высоких температур, а также прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Противопоказано использовать во время беременности и кормящим, а также людям, которые носят кардиостимуляторы и другие электронные устройства.
2. Противопоказано использовать людям с сердечной недостаточностью, злокачественной опухолью, болезнью туберкулезом.
3. В случае возникновения проблем, прекратите использование пояса и обратитесь к врачу.

ОСОБЕННОСТИ

Поверхность корсета изготовлена из эластичного материала спандекс (spandex) и дышащей сетки.

Корсет служит для надежной фиксации позвоночника, защищая связки и мышцы поясницы от травм и растяжений. Этот эффект достигается за счёт конструкции корсета, в спинной части которого, симметрично расположены 4 ребра жесткости.



ПРОГРЕВ

В комплекте предусмотрены 2 сменные подкладки:

1. Подкладка для магнитной терапии, содержащая 12 биомагнитов.
2. Подкладка с функцией самонагрева, изготовленная из ткани с большим количеством самостоятельно согревающих турмалиновых кристаллов.

Вы можете использовать сразу обе подкладки, либо одну из них, на свое усмотрение. На подкладках предусмотрены направляющие липучки, с помощью которых, подкладки крепятся к внутренней стороне ортопедического корсета.

При ношении корсета удерживается тепло человеческого тела. Нагретые таким образом турмалиновые элементы создают слабое магнитное поле, испускают отрицательно заряженные ионы, которые действуют следующим образом:

- Повышают клеточный метаболизм и обмен веществ;
- Улучшают кровоток;
- Восстанавливают лимфатическую систему;
- Укрепляет иммунитет;
- Помогают улучшить питание органов и тканей;
- Улучшают сон;
- Восстанавливают нервную систему после стресса;

ХРАНЕНИЕ / УХОД

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте.
2. Хранить в некотором расстоянии от мобильных телефонов, часов, банковских карт и других предметов чувствительных к воздействию электромагнитных полей.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: S / M / L / XL / XXL

Вес: 0,6 кг



Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»
109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1
тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2013 г.
Casada International GmbH
Все права защищены.